

Quelqu'un a perdu connaissance...

Essayez de la reveiller en la secouant et en lui parlant

Appelez le 112 "Numero Européen des Urgences"

Récupérez sans attendre votre Défibrillateur Lifepak CR Plus

Vérifier si la personne respire

Mettez le défibrillateur en marche
et suivez les indications vocales



112

+ massage
cardiaque

Comment utiliser votre défibrillateur LIFEPAK CR Plus

Mettez en marche le défibrillateur LIFEPAK CR Plus
et suivez les indications vocales.

Dégagez les vêtements de la poitrine du patient.

Collez les électrodes sur la poitrine du patient

Ecartez vous du patient

Suivez les indications vocales



Personne ne doit toucher le patient

Commencer le massage cardiaque seul
et la respiration artificielle
si vous en maitrisez la technique,
après une formation.

Continuez tant que le défibrillateur
ne vous demande pas d'arrêter
ou que les Services d'Urgences arrivent
ou encore que la victime commence à bouger.